

ADVERTENCIAS

- Se recomienda discutir con su médico el tratamiento apropiado para sus respectivos síntomas de náusea.
- El uso de BIO-ALIVIA y acceso a nuestra página web no debe ser tomado como recomendación médica la cual sólo debe ser adquirida por la evaluación y discusión con un médico.
- La acupresión provee alivio sintomático, no es una cura.
- Las náuseas y vómito pueden ser síntomas de una condición médica seria. Si los síntomas persisten consulte a su médico.
- Si presenta irritación de la piel o hinchazón suspenda su uso.
- Si sufre de problemas de circulación consulte a su médico antes de usar BIO-ALIVIA.
- No se conoce ninguna contraindicación para este producto.
- Apto para el uso de adultos y niños mayores de 3 años.
- No se deje al alcance de niños menores de 3 años.

MODO DE EMPLEO

- Las pulseras BIO-ALIVIA funcionan gracias a la aplicación del método de acupresión continua en el punto "Neiguan" o Acupunto P6 (situado entre los tendones de la muñeca) produciendo un rápido alivio de náuseas y vértigo.
- Es muy importante colocar las pulseras de acuerdo a las instrucciones para su correcto funcionamiento y utilizarlas en **AMBAS** muñecas al mismo tiempo.
- Se pueden colocar en las muñecas antes o durante el viaje y cuando se sabe que se sentirá malestar.
- BIO-ALIVIA es efectivo aunque las náuseas ya hayan comenzado.
Se recomienda usarlas continuamente mientras se está expuesto al estímulo que causa náuseas.
- Es reusable sin embargo se recomienda cambiar las pulseras si ya no aprietan el punto indicado.

INSTRUCCIONES

- 1)** Medir 2 ½ dedos (índice-medio-anular) de distancia desde la primera arruga de la muñeca.
- 2)** Exactamente a la mitad de su dedo índice en el centro de los tendones flexibles, se encuentra el punto "Neiguan" o Acupunto P6.
- 3)** En este punto se debe de colocar el botón blanco, que está integrado en la pulsera. La parte voluminosa del botón debe de estar en contacto con la piel.
- 4)** Repetir el mismo procedimiento para la otra muñeca.

EJEMPLO

